

カメラケーブル取扱い注意書 タグ 作成方法



タグの概要：カメラケーブル 中間ジョイント部分の 取付け方法、取外し方法を明記しています
 中間ジョイント部の 顕微鏡側に 取付けて使用します

カメラケーブル該当機種：MKC-230HD、MKC-700HD、MKC-704KHD
 （ブーツの色違い MKC-300HD、500HD でも代用が可能）

- タグ作成に必要なもの：
- ・ラミネーター本体+ラミネートA4用紙
 - ・ハサミ または カッター
 - ・穴あけパンチ
 - ・つづり紐 または ケーブルタイ(結束バンド)

「作成手順」

1. カメラケーブル取扱い注意タグ ファイルをダウンロードします

ファイル名：カメラケーブル取扱い注意タグ (A4横印刷)

2. A4 横 で印刷することにより、
 一度に3枚の タグの作成が出来ます

(右図は、印刷イメージです)



3. 山折り線表記の 点線に沿って、
 2つ折りにします

(取付け方法と 取外し方法が、
 背中合わせになります)

4. 点線に沿って、ハサミまたは
 カッターで 2枚重ねのまま、
 3片とも 切取っていきます




5. 切取ったタグをラミネート用紙にセツし ラミネートします



6. ラミネートが完了したら 次に 一片ずつ 切取りますが片方に、30mm 程度の余白を取ってください

(穴をあけるために必要な余白となります)

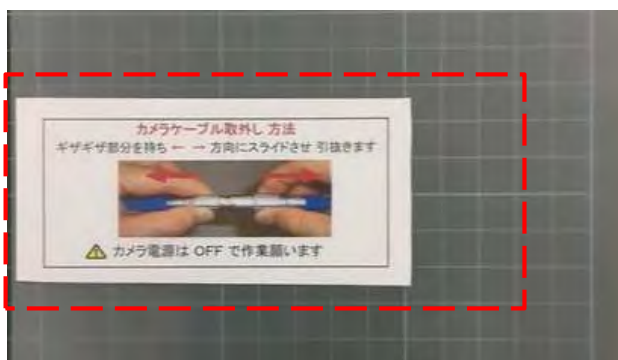

7. 切取ったタグの余白に通線用の穴をあけます
穴あけパンチ (2穴や1穴)を使用します




8. 怪我防止の為、4隅をできれば丸くカットします また、カット面全体が 鋭角になっていないことも 確認してください



9. 丸穴につづり紐 または ケーブルタイ(結束バンド)を通して、カメラケーブルに取付ければ完成です
(カメラケーブル ラック側は、巻き取る必要がありますので、顕微鏡側に 取付けます)



カメラケーブル 顕微鏡側への取付け例

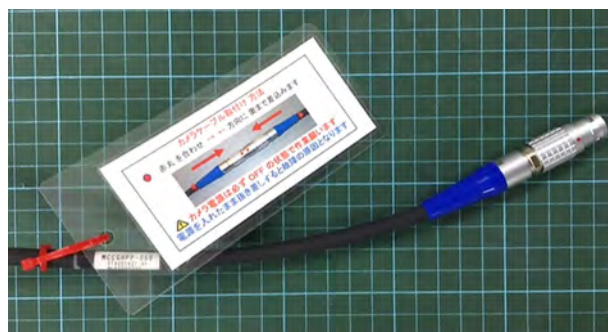

その他、ご不明な点は、ご連絡ください。